

# ULTRALIFT HIFU

**NOVI  
PROIZVOD**



Šifra 9084

# NEINVAZIVAN ALI INTENZIVAN FOKUSIRANI ULTRAZVUK

Napredni aparat za zatezanje kože

- **Ultrazvuk visokog intenziteta** za lifting lica i tela
- Stimulacija **proizvodnje novog kolagena**
- **Kontrolisana energija**, precizno fokusirana
- Duboki **SMAS lifting**



Tretman bora

Zatezanje lica

Zatezanje tela

Neinvazivno

SMAS



## PRINCIP TRETMANA:


Procedura koja usmerava **fokusiranu ultrazvučnu energiju** na preciznim dubinama i temperaturama kako bi se inicirala neokolageneza na tačno određenoj dubini tkiva, ali bez oštećenja površine kože.

U najdubljem površinskom sloju tkiva dolazi do naglog porasta temperature, čime se pokreće prirodna sinteza elastina i kolagena. Za tretman HIFU aparatom se može reći da spada u **neinvazivan ali intenzivan tretman** kojim se uspešno uklanjuju i usporavaju vidni znaci starenja kože.


## PRINCIP DELOVANJA:

Ultrazvukom se kontrolisano zagreva tkivo na dubini do 4,5 mm čime se stvaraju velike količine kolagena.

Ono što je značajno kod ove tehnologije jeste to da se može tretirati SMAS tkivo koje se nalazi između trećeg sloja kože i mišića. Aparat radi na principu usmeravanja kontrolisanih ultrazvučnih talasa koji emituju energiju u kožu i fokusiraju je na tačno određenu dubinu za proces regeneracije tkiva i lifting efekat.

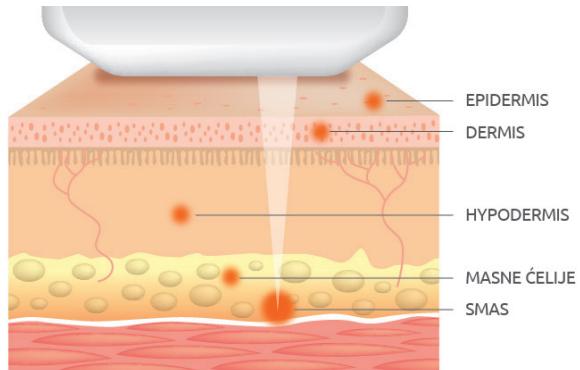

## REGIJE PRIMENE:

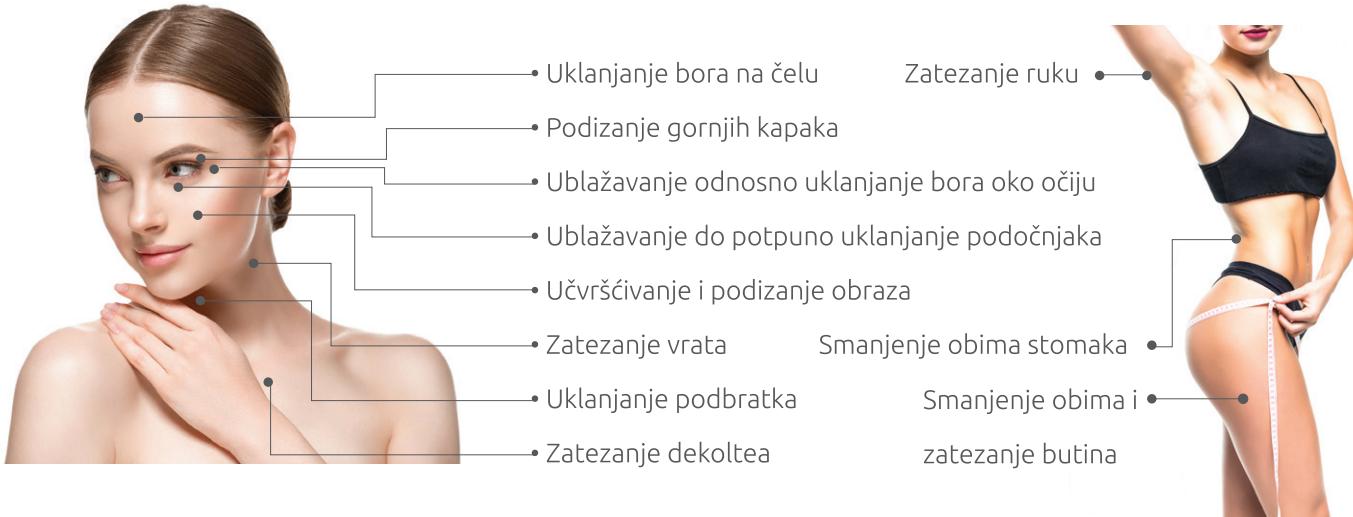

## PREDNOSTI HIFU TRETMANA:

- Bezbolna alternativa hiruškom liftingu lica
- Stimuliše i remodelira kolagen u celosti i kontrakciju elastičnih vlakana
- Rast volumena ćelija i vraćanje mladalačkog izgleda
- Ručice sa automatskim prepoznavanjem regije
- Kratko i brzo vreme tretmana: 30 min
- Nema komplikacija: koža se semo blago zacrveni u prvih nekoliko sati nakon tretmana

<b>1.5mm / 10Mhz</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tretira gornji deo epidermisa</li><li>• Smanjuje sitne bore na licu</li><li>• Pokreće regeneraciju i čini kožu svežom</li></ul>	<b>4.5mm / 4Mhz</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tretira SMAS</li><li>• Pokreće se kontrakcija vezivnog tkiva</li><li>• Podiže se koža lica, vrata i dekoltea</li></ul>
<b>3.0mm / 7Mhz</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tretira donji deo epidermisa</li><li>• Smanjuje dublje bore</li></ul>	<b>8mm / 4Mhz 13mm / 4Mhz</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tretira depozitne masnoće na telu</li><li>• Opciono</li></ul>

**Standardna oprema:** 3 kertridža (1,5 mm, 3 mm i 4,5 mm) + opcije od 8 i 13 mm

## REZULTATI:

Prvi rezultati kod većine klijenata uočavaju se neposredno nakon tretmana, veće pozitivne promene na licu vidljive su, otprilike, tri do šest meseci nakon tretmana, dok se krajnji rezultat očekuje nakon 8 meseci. Tokom tog vremena dolazi do stvaranja novog kolagena koji kožu čini zategnutijom i elastičnijom. Velika je prednost ovog tretmana što mu rezultati traju od jedne do dve godine, a u većini je slučajeva dovoljan samo jedan tretman.

## SLIKE EKRANA:



## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

**Tip:** Visokointenzivni fokusirani ultrazvuk za lice

**Ulazna snaga:** 300W

**Izlazna snaga:** 180W

**Napajanje:** 220V/110V

**HIFU kertridži:** 1,5mm 10MHz; 3,0mm 7,5MHz; 4mm 4,5MHz; (8mm, 13mm opcionalno)

**Prostor između termalnih tačaka:** 1,5mm-2,5mm korak od 0,1m

**Izlazna energija:** 0,5-5 J/cm<sup>2</sup>


**Dužina udara:** 8mm - 25mm korak od 1mm

**Broj udara ručice:** 10.000 udara

**Dimenzije ekrana:** 15"

**Neto težina aparata:** 20 kg

## DODATNA OPREMA:

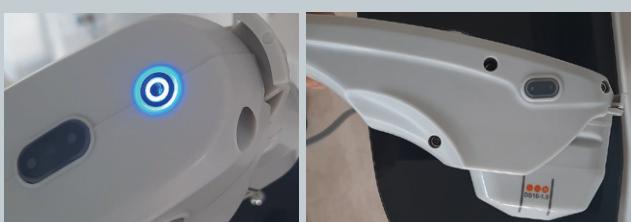

**VECOM BEAUTY SYSTEM DOO**  
Trg kralja Aleksandra 2/4  
18000 Niš  
Srbija



+381 18 4296-006  
+381 18 4296-004  
+381 63 7719-787



office@vecom.rs  
www.vecom.rs