

HYDRACLEAR 4D

**NOVI
PROIZVOD**



Šifra 9029

DUBINSKO ČIŠĆENJE

PILING

HIDRATACIJA

ANTIOKSIDATIVNA ZAŠTITA PROTIV NOVIH OŠTEĆENJA

Primenom vodonik-peroksida (čista voda se elektrolizuje u vodonik-peroksid) se generišu fini molekuli H_2 na površini kože koja ih apsorbuje, tako da jonizovana voda može brzo da proдре u kožu, čineći je čistom, sjajnom i blistavom.

U kombinaciji sa hranljivim materijama u obliku bustera, kroz princip visokofrekventnog vibracijskog električnog talasa i tehnologije grejanja radio frekvencije, može omekšati kaverozna vlakna, duboko čistiti nečistoće kože i stimulisati produkciju kolagena u srednjem sloju kože.

Faze tretmana:

1. Čišćenje kože
UZV špatulom i vodom
2. Piling - hidradermoabrazija
3. Ekstrakcija
(rastvaranje preparata)
4. Hidratacija
5. Stimulacija kolagena

KORAK 1 - čišćenje:

Primenom silikonske sonde koja ima mogućnost rotacije za 360 stepeni i putem snažnog vakuma, obavlja se proces čišćenja kože, putem koga se uvlače sve nečistoće sa površine lica. Za čišćenje se koristi rastvor Beta hidroksi kiselina (BHA) i antioksidansi koji prolaze u dublje slojeve i odstranjuju višak sebuma koji je zarobljen.

Sa podešenim interfejsom, moć uvlačenja tkiva je optimalna, čime je omogućeno dubinsko čišćenje bez povređivanja kože.

Sa negativnim pritiskom do 92KPa, u kombinaciji sa toplim i hladnim podesivim režimom, voda sa jonima vodonika sa koncentracijom do 1480ppb može se trenutno koristiti za čišćenje spoljašnjeg sloja kože i dublje pora - jedinstvenom rotacijom, ujedno povećavajući elastičnost kože.

KORAK 2 - piling hidrodermoabrazija

Pomoću određenih rastvora antioksidanasa (retinoli, polifenoli), obavlja se nežan piling preko namenske sonde, čime se otvaraju pore i uklanjaju mrtve ćelije kože. Ovi preparati u vidu bustera natapaju i čiste kožu, omogućavajući razlaganje nečistoća. Istovremeno omogućavaju omekšavanje kaveroznih vlakana i ujednačeno skidanje izumrlih ćelija.

Kako se ovim tretmanom vodi računa o zdravlju kože, tako se koriste prirodni preparati poput hijaluronske kiseline, vitamina E, vitamina C, beta karotena.

KORAK 3: hidratacija kože (sonda za bočicom u koju se sipa preparat)

Dubinska hidratacija ima za cilj da zdravo nahrani kožu koja dobija na blistavosti, svežini i lepoti. Mlazom pod visokim pritiskom ubrizgavamo serum obogaćen hijaluronskom kiselinom, antioksidantima i peptidima koji pružaju visokokvalitetnu hidrataciju i zaštitu kože.

Postupak delovanja pod visokim pritiskom od 800KPa omogućava da se brzo usmeri delovanje bustera direktno u srednji sloj kože, tako da se visoke koncentracije aktivnih proizvoda lako apsorbuju i stimulišu regeneraciju proteina.

KORAK 4: Stimulacija kolagena

Kotrljajuće elektrode simuliraju akciju masaže, a bipolarni RF radio frekvencijski Y oblik je pogodan za stimulaciju nove reorganizacije potkožnog kolagena. Ciljajući na opuštene kesice ispod očiju, bore u uglovima očiju i konture brade, iznutra ka spolja, odozgo prema dole, zateže lice.

Duboko aktivira kolagen - Podiže i zateže kožu, poboljšava opuštene konture lica, uklanja bore i smanjuje znake starenja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Naziv aparata	HydraClear 4D
Funkcije aparata	Čišćenje, piling, ekstrakcija, hidratacija
RF frekvencija	1-2 MHz
RF tip	bipolarni
Hidro boce za lice	Tip A, B, C
Nastavci za hidrodermoabraziju	8
Napon	AC110V/220V 50-60Hz
Ekran	5.2 inch LCD Touch screen
Snaga	12V, 4A, 48W
Vakum pumpa za hidrodermoabraziju	16L
Dimenzije	visina x širina sa i bez ručica x dubina: (410mm x 335mm (440mm) x 160mm



VECOM BEAUTY SYSTEM DOO

Trg kralja Aleksandra 2/4

18000 Niš

Srbija



+381 18 4296-004

+381 63 7719-787



office@vecom.rs

www.vecom.rs