

RF FRACTIO 3



Šifra 6027

SONDA SA MIKROIGLICAMA RF

SONDA ZA ULTRAZVUK

SONDA SA HLAĐENJE KOŽE

RF FRACTIO – frakcioni RF

TRETMAN KOJI POPRAVLJA STANJE KOŽE




- Zatezanje kože
- Uklanjanje ožiljaka od akni
- Uklanjane ožiljka od povreda i hiruških procedura
- Smanjenje bora
- Skupljanje proširenih pora
- Uklanjanje strija, pega i kapilara

Radofrekventi tretman je termički podmlađujući tretman sa toplotom visoke frekvencije. Frakcioni RF je ciljni tretman radiofrekvencijom, podržan dodatnim funkcijama kao što su mikroigle za fokusiranje područja delovanja.

Sistem rada aparata je FRAKCIJONISAN, gde je energija podeljena na najsitnije delove i osim na površinski sloj svojom toplotom deluje i na dublje slojeve kože. Efekat je obnova kolagena u dubljim slojevima kože i potpuna obnova spoljašnje površine kože.

Tretman se sastoji iz 3 faze:

I faza

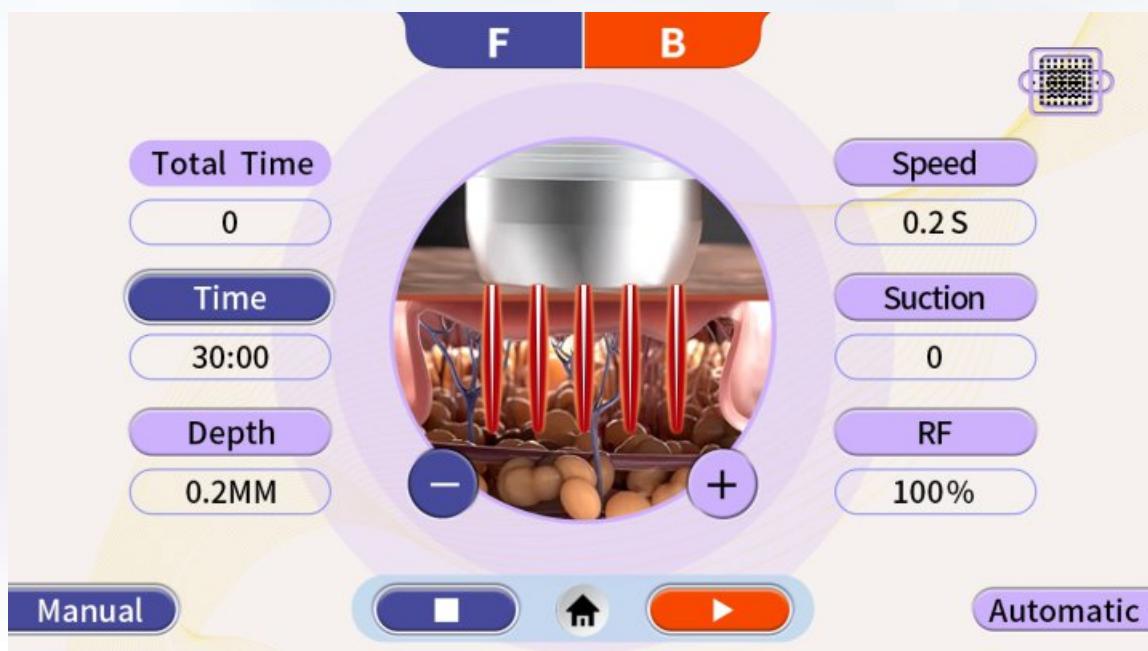


Otvaranje mikro-kanala u koži frakcionisanim modulom, pomoću mikroiglica. Otvoreni mikrokanali stvaraju prolaz u dublje slojeve kože. Istovremeno, kontrolisano termičko oštećenje površnog sloja kože koje mikroplazma stvara, pokreće prirodni proces regeneracije koji zamenjuje ožiljno tkivo zdravim, novim kolagenom. Mikro kanali su okruženi delovima cele, nepovređene kože koja pomaže u brzom oporavku, kao što prirodno nastaje zarastanje kože nakon male povrede.

II faza

Kada koža ima otvorene mikro-kanale, aparat koristi ultrazvučnu tehnologiju za ubacivanje regenerativnih supstanci kroz njih, omogućujući njihovim terapeutskim svojstvima da dalje tretiraju oštećeno tkivo i u dubljim slojevima kože. U tu svrhu se koriste matične ćelije, peptidi, hijaluronska kiselina, kompleksi vitamina i antioksidanasa.

III faza

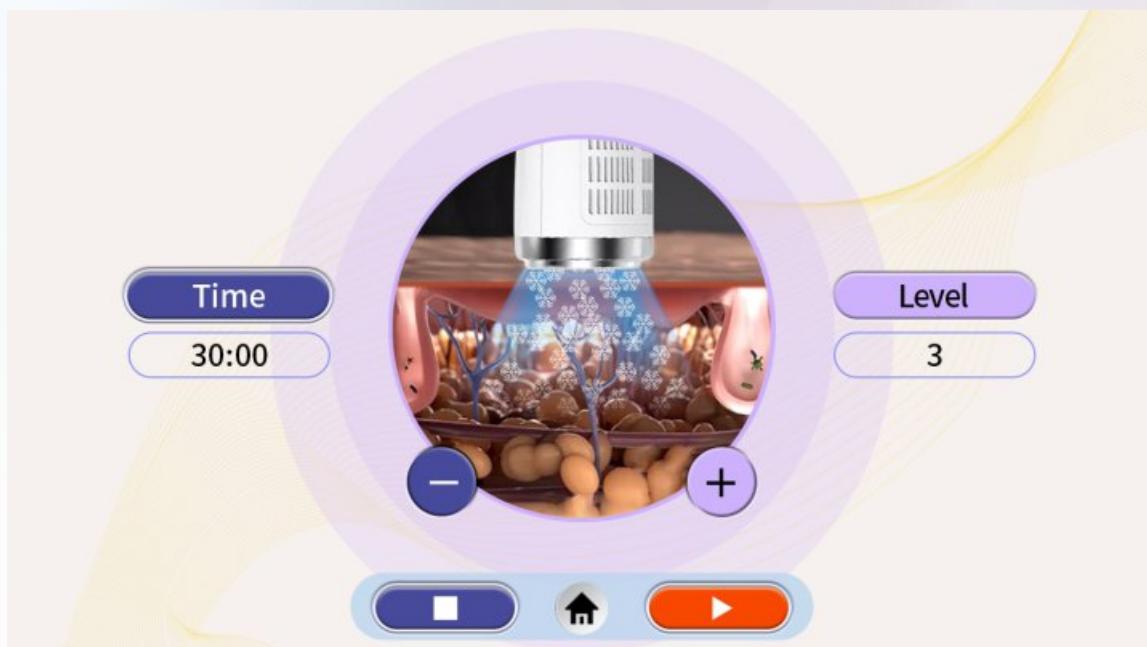

Fizičko hlađenje, temperatura koja je 0-5 stepeni Celzijusa, smiruje kožu i skuplja kapilare, smanjuje pore, otklanja crvenilo i otok, i čini kožu lepšom.

Hladnoća umiruje

Fizičko hlađenje, princip toplotnog širenja i kontrakcije, temperatura koja je 0-5 stepeni Celzijusa, smiruje kožu i skuplja kapilare, zateže kožu i smanjuje pore, otklanja crvenilo i otok, i čini kožu lepšom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Model:	RF FRACTIO 3- frakcioni RF
Šifra aparata:	6027
Ručica:	RF Frakciona ručica, Mikroelektronska ručica
Nivo:	1-10
Energija:	30%-100%
Frekvencija:	1kHz
Brzina:	0.1-0.5s
Dubina:	0.2mm - 3.5mm
Pritisak:	0-10
Radni interfejs	7 " LCD ekran osetljiv na dodir
Sistem hlađenja:	prinudno vazdušno hlađenje
Napajanje:	AC230V±10% / 50Hz / 110V±10%/60Hz
Opseg radne temperature:	10°C~30°C
Obim relativne vlažnosti:	≤80%
Atmosferski pritisak :	86kpa~106kpa;
Temperatura okoline:	0°C~55°C
Napajanje:	AC230V±10% / 50Hz / 110V±10%/60Hz
Dimenzije:	600 x 400 x 500mm



VECOM BEAUTY SYSTEM DOO
Trg kralja Aleksandra 2/4
18000 Niš
Srbija



+381 18 4296-004
+381 63 7719-787



office@vecom.rs
www.vecom.rs